

Rückenschmerzen?
Nehmen SIE es
SELBST in die Hand!


WiTouch™ Pro

Das weltweit erste, komplett
kabellose TENS für Rückenschmerzen



WiTouch™Pro

das TENS Gerät bei Rückenschmerzen

Das WiTouch™Pro Gerät bietet eine sichere und wirksame Behandlung für Schmerzen im unteren Rücken. Das CE-zertifizierte Medizinprodukt hat die Zulassung US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) mit folgenden Angaben erhalten:

"WiTouch™Pro, das transkutane, elektrische Nervenstimulationsgerät ist für die Linderung der Symptome und die Behandlung von chronischen, nicht-behandelbaren Schmerzen im oberen und unteren Rücken geeignet. Es kann auch als eine zusätzliche Behandlung bei akuten Schmerzen nach einer Operation oder einem Unfall eingesetzt werden."



WiTouch™ Pro

das TENS Gerät bei Rückenschmerzen

Es gibt nur eine Kontraindikation für den Einsatz von WiTouch™ Pro:

Das Gerät darf **NICHT** verwendet werden, wenn ein Herzschrittmacher, ein implantierter Defibrillator oder andere implantierte, metallische elektronische Geräte getragen werden.



WiTouch™Pro

das TENS Gerät bei Rückenschmerzen

Die besonderen Vorteile von WiTouch™Pro

- komplett kabellos – kann daher den ganzen Tag unter der Kleidung getragen werden
- Mini-Fernbedienung für einfache Bedienung unterwegs
- einfachste Anwendung, da nur 1 vordefiniertes Programm
- das patentierte Programm wechselt automatisch zwischen hohen und niedrigen Frequenzen – für optimales Schmerzmanagement



WiTouch™Pro

das TENS Gerät bei Rückenschmerzen

Die besonderen Vorteile von WiTouch™Pro

- durch vorgegebenes Programm sind nur noch 3 Knöpfe zur Anwendung nötig: Ein-/Ausshalter, + /– Tasten
- automatische Programmdauer von 30 Minuten
- energiesparsam: bis zu 150 Anwendungen mit 2 Stück AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- beiliegende Gelpads sind bis zu 5x wiederverwendbar
- ansprechendes, preisgekröntes Design (RedDot Award)



WiTouch™ Pro

das TENS Gerät bei Rückenschmerzen

Die sehr einfache Anwendung von WiTouch™ Pro

- Waschen Sie die Haut des unteren Rückens und trocknen Sie sie gut ab (bei vorhandener Körperbehaarung an dieser Stelle, muss diese rasiert werden)
- Drücken Sie die ON/OFF-Taste auf dem WiTouch™ Pro Gerät und halten Sie diese für eine Sekunde gedrückt, um es einzuschalten. Die LED-Leuchte blinkt und das Gerät ist bereit für den Einsatz.
- Nehmen Sie einen Streifen mit zwei WiTouch™ Gel-Pads aus der Verpackung, entfernen Sie die blauen Schutzstreifen der GelPads und platzieren Sie die Pads auf den schwarzen Flächen des WiTouch™ Pro Gerätes.



WiTouch™Pro

das TENS Gerät bei Rückenschmerzen

Die sehr einfache Anwendung von WiTouch™Pro

- Drücken Sie fest auf die gesamte Oberfläche der Gel-Pads, damit sie gut am Gerät haften und nicht verrutschen.
- Entfernen Sie nun die grünen Schutzfolien der Gel-Pads und platzieren Sie das WiTouch™Pro Gerät mit den Gel-Pads auf dem Rücken. Die Mitte des Gerätes sollte dabei parallel zur Wirbelsäule sein.
- Drücken Sie nun die START/STOP-Taste auf der Fernbedienung, um mit der Behandlung zu beginnen. Das Gerät startet nun ein Programm von 30 Minuten, in denen zwei alternierenden Frequenzen verabreicht werden.



WiTouch™Pro

das TENS Gerät bei Rückenschmerzen

Die sehr einfache Anwendung von WiTouch™Pro

- Nach etwa 5 Minuten schaltet das Gerät auf eine andere Frequenz, die sich auch anders anfühlt.
- Drücken Sie die Plus-Taste (+), um die Intensität zu erhöhen oder die Minus-Taste (-), um die Intensität zu verringern. Sie sollten eine für Sie angenehme Intensität für die Stimulation einstellen.
- Die Behandlung stoppt automatisch nach 30 Minuten. Um eine neue Behandlung zu starten wiederholen Sie die Schritte ab dem Behandlungsstart (START/STOP-Taste).
- Das WiTouch™Pro Gerät schaltet sich automatisch nach zwei Stunden komplett aus, wenn es nicht benutzt wurde.



WiTouch™Pro

das TENS Gerät bei Rückenschmerzen

Die sehr einfache Anwendung von WiTouch™Pro

- Um das Gerät wieder einzuschalten, wiederholen Sie die Schritte ab dem Einschalten(ON/OFF-Taste).
- Wenn Sie die Behandlung (en) abgeschlossen haben, können Sie das Gerät von der Haut entfernen. Bringen Sie die grüne Schutzfolie wieder an den Gel-Pads an. Sie können die Gel-Pads bis zu 3-5-mal wiederverwenden - je nach Hauttyp, Fett- und Säuregehalt der Haut. Wenn die Gel-Pads nicht mehr vollständig haften, müssen sie durch neue ersetzt werden.
- Drücken Sie die ON/OFF-Taste auf dem Gerät für 3 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.



WiTouch™Pro

das TENS Gerät bei Rückenschmerzen

Die sehr einfache Anwendung von WiTouch™Pro

- Legen Sie das WiTouch™Pro Gerät mit der Fernbedienung am besten wider in die Aufbewahrungsbbox. Falls erforderlich, verwenden Sie ein feuchtes Tuch (eventuell mit einer milden Seife) zur Reinigung des Geräts.
- Wenn das WiTouch™Pro Gerät für eine lange Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die 2 AAA-Batterien aus dem Batteriefach.



WiTouch™Pro

das TENS Gerät bei Rückenschmerzen

So verbinden Sie das Gerät mit der Fernbedienung

- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät
- Drücken sie auf der Fernbedienung gleichzeitig die + und die – Taste für ca. 10 Sekunden bis das Lämpchen grün leuchtet
- Legen Sie die Batterien wieder ein
- Das Gerät ist nun wieder mit der Fernbedienung verbunden

